


# Secuderm



1 Pour une étanchéité parfaite et un retrait plus facile, raser, nettoyer et sécher la partie de peau saine autour de la zone à protéger.

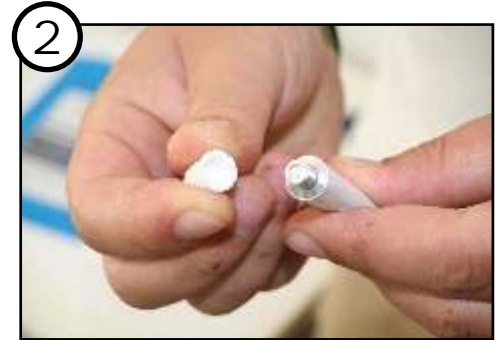

2 Dévissez le bouchon du tube de colle en gardant la tête vers le haut. Percez l'opercule avec le dos du bouchon.



3 Découpez le film de protection à la taille souhaitée (ne pas hésiter à largement déborder sur la zone à protéger).



4 Appliquez le gel sur une peau saine, ne pas hésiter à utiliser l'extrémité du tube comme applicateur.



5 Contournez la zone à protéger de façon continue en exerçant une légère pression sur le tube. Bien s'assurer que vous avez appliqué la colle tout autour de la zone.



6 Attendre 3 minutes que le solvant s'évapore. Séparer le film de son support protecteur en le déchirant légèrement, puis l'appliquer sur la partie encollée.



7 Pressez le film au niveau du cordon de colle afin d'assurer une bonne adhesion.



8 Si vous le souhaitez, vous pouvez découper le surplus, votre plaie est désormais protégée et à l'abri de l'eau.

Appliquer le produit sur une peau saine.  
Ne pas appliquer de colle sur une plaie, ni dans les yeux.

Une fois en place la protection peut rester en place jusqu'à 5 jours.  
Vous pouvez bouger librement, Sécuderm Marine s'utilise aussi bien en eau douce ou dans l'eau de mer.

## Pour enlever la protection :

Attendre au minimum 45mn après la pose du film protecteur avant de le retirer afin de limiter les résidus de colle.  
Retirer doucement et très progressivement le film plastique.

## Distribution

NOCIKA - route Jean Moulin - 13300 Salon de Provence